

## **BRUKERVEILEDNING MUNNBIND – WOWEFFEKT**

Gjenbrukbart, ikke-medisinsk munnbind i bomull

som består av 3 lag med tekstil. I tillegg leveres munnbindet med et karbonfilter som gir 5 lag beskyttelse i tillegg.

Munnbindet kan vaskes og gjenbrukes i lang tid.

For rengjøring av munnbindet: vask med såpe og vann for hånd i minimum 60 grader og heng til tørk– eventuelt vask munnbindet på 60 grader i vaskemaskin. Skadet munnbind skal kasseres.

Munnbind danner en fysisk barriere mot dråper, og kan derfor hindre smitte av luftveisinfeksjoner. For at munnbindet skal virke må det brukes på riktig måte (se illustrasjon)

**HUSK ALLTID Å VASKE/SPRITE HENDER FØR DU TAR PÅ MUNNBINDET OG ETTER DU HAR TATT DET AV**

Bruksområde: Brukes av friske personer som ønsker å dekke nese og munn når de er ute i det offentlige rom der munnbind er anbefalt eller påbudt (kollektiv transport, butikk mm)

**Munnbindet i bomull gir ikke like god beskyttelse som medisinske munnbind, og er derfor ikke anbefalt til syke personer eller personer som har nær kontakt med syke mer info under produktet eller ta kontakt med oss ved ytterligere spørsmål [www.woweffekt.no](http://www.woweffekt.no)**

**MUNNBINDET KAN ALDRI ERSTATTE TILTAK SOM SOSIAL DISTANSE OG HYPPIG VASK AV HENDER – MUNNBINDET ER ET TILLEGGSVIRKEMIDDEL**